


TILLPASSNINGSG KONTROLL MED ISOAMYLACETAT

MTRL NR 0969:00

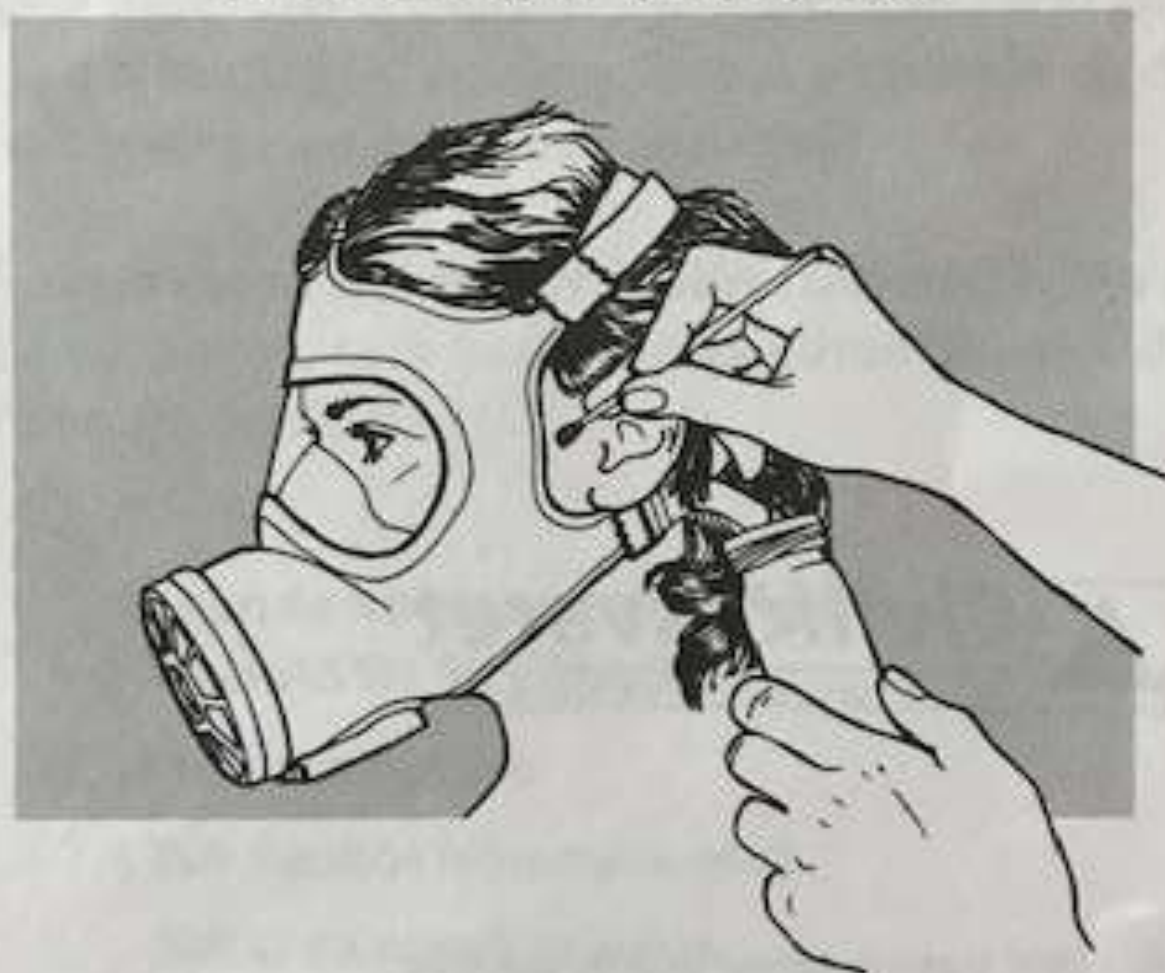

RÄDDNINGSG
VERKET

BRUKSANVISNING

Tillpassningskontrollen måste ske i ett rum som är avskilt från den plats där skyddsmasken tagits på.

Skyddsmasken skall ej tas av i provrummet. Personen som skall kontrolleras uppmanas att andas djupt och lugnt.

Rätt genomförd tillpassningskontroll kan påvisa en inläckning av ca 1 %.

GÖR SÅ HÄR:

- 1) Informera den kontrollerade enl ovan och förklara hur provet går till.
- 2) Fukta bomullstussen på tampongpinnen med isoamylacetat. Stäng flaskan.
- 3) För tampongpinnen (under inandningsfasen) runt skyddsmaskens tätningkant ca två cm från ansiktet.
- 4) Låt därefter personen med skyddsmask vrida huvudet maximalt till vänster - höger - upp - ned - samt högt tala om sitt personnummer och fullständiga namn. Samtidigt förs tampongpinnen ytterligare en gång runt maskens tätningkant.
- 5) Kontrollera genom att fråga om personen känner någon lukt.